

KOVA-Trol® II Niedrig-Abnormwert-Datenblatt

Produktbeschreibung: KOVA-Trol II Niedrig-abnorm

Artikelnummer: Kit 87130 (4 x 15 mL)

Die repräsentativen Bereiche werden statistisch auf Grundlage historischer Daten bestimmt und regelmäßig mit repräsentativen Chargen überprüft, die mit der angegebenen Methode getestet wurden.

Siemens-Urinteststreifen-Analytik							McKesson
Analyt	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	7,0 - 8,5	7,0 - 8,5	7,5 - 8,5	7,0 - ≥9,0	6,5 - 8,5	7,0 - 8,5	7,0 - 8,5
Protein	Negativ - 100	Negativ - 30 mg/dL	Negativ - 30 mg/dL	Negativ - 30 mg/dL	Negativ - 30 mg/dL	Negativ - 30 mg/dL	Negativ - 30 mg/dL
Glukose	100 - 500 mg/dL	100 - 500 mg/dL	100 - 500 mg/dL	100 - 500 mg/dL	100 - 500 mg/dL	100 - 500 mg/dL	100 - 500 mg/dL
Ketone	5 - 40 mg/dL	Spur - 40 mg/dL	Spur - 40 mg/dL	Spur - 40 mg/dL	Spur - 40 mg/dL	Spur - 40 mg/dL	5 - 40 mg/dL
Bilirubin	1 + - 3 +	Mittel - Stark	Gering - Stark	Mittel - Stark	Gering - Stark	Gering - Stark	Negativ - 1
Blut (Hämoglobin)	1 + - 3 +	Spur-lysiert - Mittel	Spur - Mittel	Spur-lysiert - Mittel	Gering - Mittel	Spur - Mittel	25 - 200 Ery/μL
Nitrit	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
Urobilinogen	0,2 - 1 EU/dL	0,2 - 1,0 EU/dL	0,2 - 1,0 EU/dL	0,2 - 1,0 EU/dL	0,2 - 1,0 EU/dL	0,2 - 1,0 EU/dL	0,2 - 1 mg/dL
Spezifisches Gewicht	1,005 - 1,020	≤1,005 - 1,015	≤1,005 - 1,025	≤1,005 - 1,025	≤1,005 - 1,020	≤1,005 - 1,015	1,005 - 1,020
Leukozytenesterase	1 + - 3 +	Spur - Stark	Spur - Stark	Spur - Stark	Spur - Stark	Spur - Stark	70 – 500 Leu/μL
Mikroalbumin	—	30 - 150 mg/L	30 - 150 mg/L	30 - 150 mg/L	—	10 - 150	—
Kreatinin	50 - 300 mg/dL	100 - 300 mg/dL	100 - 300 mg/dL	100 - 300 mg/dL	100 - 300 mg/dL	100 - 300 mg/dL	—
A : C	—	<30 Normal - 30 - 300 mg/g Abnormal			—	Normal	—

KOVA-Trol® II Niedrig-Abnormwert-Datenblatt

Produktbeschreibung: KOVA-Trol II Niedrig-abnorm

Artikelnummer: Kit 87130 (4 x 15 mL)

Die repräsentativen Bereiche werden statistisch auf Grundlage historischer Daten bestimmt und regelmäßig mit repräsentativen Chargen überprüft, die mit der angegebenen Methode getestet wurden.

Roche-Urinteststreifen-Analytik							
Analyt	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	7 - 8	7 - 8	7 - 8	7 - 8	7 - 8	7 - 8	7 - 8
Protein	Negativ - 30 mg/dL	Negativ - 30 mg/dL	Negativ - 30 mg/dL	Negativ - 25 mg/dL	Negativ - 30 mg/dL	Negativ - 75 mg/dL	Negativ - 30 mg/dL
Glukose	100 - 300 mg/dL	100 - 500 mg/dL	100 - 250 mg/dL	100 - 300 mg/dL	100 - 250 mg/dL	100 - 300 mg/dL	100 - 250 mg/dL
Ketone	1 + - 2 +	1 + - 2 +	5 - 50 mg/dL	5 - 50 mg/dL	5 - 50 mg/dL	5 - 50 mg/dL	5 - 50 mg/dL
Bilirubin	1 + - 2 +	1 + - 2 +	Negativ - 1 mg/dL	1 - 3 mg/dL	1 - 3 mg/dL	1 - 3 mg/dL	1 - 3 mg/dL
Blut (Hämoglobin)	5-10 - 250 Ery/μL	Spur - 250 Ery/μL	50 - 250 Ery/μL	50 - 150 Ery/μL	50 - 250 Ery/μL	50 - 250 Ery/μL	50 - 250 Ery/μL
Nitrit	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
Urobilinogen	Normal - 1 mg/dL	Normal - 1 mg/dL	Normal - 1 mg/dL	Normal - 1 mg/dL	Normal - 1 mg/dL	Normal - 1 mg/dL	Normal - 1 mg/dL
Spezifisches Gewicht	1,000 - 1,010	1,000 - 1,010	1,005 - 1,015	1,005 - 1,015	1,005 - 1,015	1,005 - 1,015	1,000 - 1,015
Leukozytenesterase	10 - 25 - 500 Leu/μL	Spur - 2+	25 - 500 Leu/μL	25 - 500 Leu/μL	25 - 500 Leu/μL	100 - 500 Leu/μL	25 - 500 Leu/μL

KOVA-Trol® II Niedrig-Abnormwert-Datenblatt

Produktbeschreibung: KOVA-Trol II Niedrig-abnorm
 Artikelnummer: Kit 87130 (4 x 15 mL)

Die unten dargestellten repräsentativen Bereiche werden für jede Charge bestätigt.

Physikalische und mikroskopische Eigenschaften		
Marker	Methode	Bereich
Spezifisches Gewicht	Refraktometer (digital)	≤1,005 - 1,025
Osmolalität	Osmometer	100 - 400 mOsm/kg
pH	pH-Meter	7,0 - 8,5
Aussehen	Visuell	Klar - leicht trüb
Farbe	Visuell	Gelb - Grün
Mittlere Erythrozytenzellzahl	Mikroskopie	1 - 12 Zellen/hpf*
Mittlere Leukozytenzellzahl	Mikroskopie	1 - 12 Zellen/hpf*
Kristalle	Mikroskopie	Vorhanden
Zylinder	Mikroskopie	<1

* Zellen pro Gesichtsfeld bei hoher Vergrößerung, gemessen mit 10X-Okular/40X-Objektiv

Schwangerschaftstestung		
Marker	Methode	Bereich
hCG	Quidel QuickVue hCG-Urintest	Negativ