

KOVA-Trol® II Ficha de valor anómalo baixo

Descrição do produto: KOVA-Trol II Anómalo baixo

Número de material: Kit 87130 (4 x 15 ml)

Os intervalos representativos são determinados estatisticamente com base em dados históricos e verificados periodicamente com lotes representativos testados no método especificado.

Teste com tiras de análise à urina Siemens							McKesson
Analito	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	7,0-8,5	7,0-8,5	7,5-8,5	7,0-≥9,0	6,5-8,5	7,0-8,5	7,0-8,5
Proteína	Negativo - 100	Negativo - 30 mg/dL	Negativo - 30 mg/dL	Negativo - 30 mg/dL	Negativo - 30 mg/dL	Negativo - 30 mg/dL	Negativo - 30 mg/dL
Glicose	100-500 mg/dL	100-500 mg/dL	100-500 mg/dL	100-500 mg/dL	100-500 mg/dL	100-500 mg/dL	100-500 mg/dL
Cetonas	5-40 mg/dL	Vestígio - 40 mg/dL	Vestígio - 40 mg/dL	Vestígio - 40 mg/dL	Vestígio - 40 mg/dL	Vestígio - 40 mg/dL	5-40 mg/dL
Bilirrubina	1 + - 3 +	Moderado - Grande	Pequeno - Grande	Moderado - Grande	Pequeno - Grande	Pequeno - Grande	Negativo - 1
Sangue (hemoglobina)	1 + - 3 +	Lisado vestigial - Moderado	Vestígio - Moderado	Lisado vestigial - Moderado	Pequeno - Moderado	Vestígio - Moderado	25-200 Ery/μl
Nitrito	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Urobilinogénio	0,2-1 UE/dL	0,2-1,0 UE/dL	0,2-1,0 UE/dL	0,2-1,0 UE/dL	0,2-1,0 UE/dL	0,2-1,0 UE/dL	0,2-1 mg/dL
Gravidade específica	1,005-1,020	≤1,005-1,015	≤1,005-1,025	≤1,005-1,025	≤1,005-1,020	≤1,005-1,015	1,005-1,020
Esterase leucocitária	1 + - 3 +	Vestígio - Grande	Vestígio - Grande	Vestígio - Grande	Vestígio - Grande	Vestígio - Grande	70-500 Leu/μl
Microalbumina	N/A	30-150 mg/L	30-150 mg/L	30-150 mg/L	N/A	10-150	N/A
Creatinina	50-300 mg/dL	100-300 mg/dL	100-300 mg/dL	100-300 mg/dL	100-300 mg/dL	100-300 mg/dL	N/A
A : C	N/A	<30 Normal – 30-300 mg/g Anómalo			N/A	Normal	N/A

KOVA-Trol® II Ficha de valor anómalo baixo

Descrição do produto: KOVA-Trol II Anómalo baixo

Número de material: Kit 87130 (4 x 15 ml)

Os intervalos representativos são determinados estatisticamente com base em dados históricos e verificados periodicamente com lotes representativos testados no método especificado.

Teste Roche Urinalysis Strip							
Analito	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
Proteína	Negativo - 30 mg/dL	Negativo - 30 mg/dL	Negativo - 30 mg/dL	Negativo - 25 mg/dL	Negativo - 30 mg/dL	Negativo - 75 mg/dL	Negativo - 30 mg/dL
Glicose	100-300 mg/dL	100-500 mg/dL	100-250 mg/dL	100-300 mg/dL	100-250 mg/dL	100-300 mg/dL	100-250 mg/dL
Cetonas	1 + - 2 +	1 + - 2 +	5-50 mg/dL	5-50 mg/dL	5-50 mg/dL	5-50 mg/dL	5-50 mg/dL
Bilirrubina	1 + - 2 +	1 + - 2 +	Negativo - 1 mg/dL	1-3 mg/dL	1-3 mg/dL	1-3 mg/dL	1-3 mg/dL
Sangue (hemoglobina)	5-10-250 Ery/μl	Vestígio - 250 Ery/μl	50-250 Ery/μl	50-150 Ery/μl	50-250 Ery/μl	50-250 Ery/μl	50-250 Ery/μl
Nitrito	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Urobilinogénio	Normal - 1 mg/dL	Normal - 1 mg/dL	Normal - 1 mg/dL	Normal - 1 mg/dL	Normal - 1 mg/dL	Normal - 1 mg/dL	Normal - 1 mg/dL
Gravidade específica	1,000-1,010	1,000-1,010	1,005-1,015	1,005-1,015	1,005-1,015	1,005-1,015	1,000-1,015
Esterase leucocitária	10-25-500 Leu/μl	Vestígios - 2+	25-500 Leu/μl	25-500 Leu/μl	25-500 Leu/μl	100-500 Leu/μl	25-500 Leu/μl

KOVA-Trol® II Ficha de valor anômalo baixo

Descrição do produto: KOVA-Trol II Anômalo baixo
 Número de material: Kit 87130 (4 x 15 ml)

Os intervalos representativos apresentados abaixo são confirmados para cada lote.

Características físicas e microscópicas		
Marcador	Método	Intervalo
Gravidade específica	Refratômetro (digital)	≤1,005-1,025
Osmolalidade	Osmómetro	100-400 mOsm/kg
pH	Medidor de pH	7,0-8,5
Aspeto	Visual	Transparente - Ligeiramente turvo
Cor	Visual	Amarelo - Verde
Contagem média de células de RBC	Microscopia	1-12 células/hpf*
Contagem de células médias de WBC	Microscopia	1-12 células/hpf*
Cristais	Microscopia	Presente
Moldes	Microscopia	<1

* Células por campo de alta potência, conforme medido utilizando a ocular 10X/objetiva 40X

Teste de gravidez		
Marcador	Método	Intervalo
hCG	Teste de urina Quidel QuickVue hCG	Negativo