

KOVA-Trol® III Φυσιολογικό με δελτίο τιμών hCG

Περιγραφή του προϊόντος: KOVA-Trol III Φυσιολογικό με hCG
 Αριθμός υλικού: Kit 87331 (4 x 15 ml), 87327 (4 x 60 ml) και 87528 (8 x 60 ml)

Τα αντιπροσωπευτικά εύρη καθορίζονται στατιστικά με βάση τα ιστορικά δεδομένα και επαληθεύονται περιοδικά με αντιπροσωπευτικές παρτίδες που εξετάζονται στην καθορισμένη μέθοδο.

Εξέταση ανάλυσης ούρων με ταινίες Siemens							McKesson
Αναλύτης	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	5,5-7,0	5,0-7,0	5,0-7,0	5,0-7,0	5,5-7,0	5,5-7,0	5,5-6,5
Πρωτεΐνη	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό
Γλυκόζη	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό
Κετόνες	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό
Χολερυθρίνη	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό
Αίμα (αιμοσφαιρίνη)	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό
Νιτρίτης	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό
Ουροχολινογόνο	0,2-1 EU/dl	0,2-1 EU/dl	0,2-1 EU/dl	0,2-1 EU/dl	0,2-1 EU/dl	0,2-1 EU/dl	0,2-1 EU/dl
Ειδικό βάρος	1,005-1,020	≤1,005-1,020	≤1,005-1,020	≤1,005-1,020	≤1,005-1,020	1,000-1,010	1,005-1,020
Εστεράση λευκοκυττάρων	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό
Μικροαλβουμίνη	Δ/Ε	10 mg/dl	10 mg/dl	10 mg/dl	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
Κρεατινίνη	10-100 mg/dl	10-100 mg/dl	10-100 mg/dl	10-100 mg/dl	10-100 mg/dl	10-50 mg/dl	Δ/Ε
A : C	Δ/Ε	<30 Φυσιολογικό			Δ/Ε	Φυσιολογικό: Αραίωση - Φυσιολογική	Δ/Ε

KOVA-Trol® III Φυσιολογικό με δελτίο τιμών hCG

Περιγραφή του προϊόντος: KOVA-Trol III Φυσιολογικό με hCG
 Αριθμός υλικού: Kit 87331 (4 x 15 ml), 87327 (4 x 60 ml) και 87528 (8 x 60 ml)

Τα αντιπροσωπευτικά εύρη καθορίζονται στατιστικά με βάση τα ιστορικά δεδομένα και επαληθεύονται περιοδικά με αντιπροσωπευτικές παρτίδες που εξετάζονται στην καθορισμένη μέθοδο.

Εξέταση ανάλυσης ούρων με ταινίες Roche							
Αναλύτης	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	5-7	5-7	5,5-7,0	5-7	5-7	5-7	5,5-7,0
Πρωτεΐνη	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό
Γλυκόζη	Φυσιολογικό	Φυσιολογικό	Φυσιολογικό	Φυσιολογικό	Φυσιολογικό	Φυσιολογικό	Φυσιολογικό
Κετόνες	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό
Χολερυθρίνη	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό
Αίμα (αιμοσφαιρίνη)	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό
Νιτρίτης	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό
Ουροχολινογόνο	Φυσιολογικό	Φυσιολογικό	Φυσιολογικό	Φυσιολογικό	Φυσιολογικό	Φυσιολογικό	Φυσιολογικό
Ειδικό βάρος	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,000-1,015
Εστεράση λευκοκυττάρων	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Αρνητικό

KOVA-Trol® III Φυσιολογικό με δελτίο τιμών hCG

Περιγραφή του προϊόντος: KOVA-Trol III Φυσιολογικό με hCG
Αριθμός υλικού: Kit 87331 (4 x 15 ml), 87327 (4 x 60 ml) και 87528 (8 x 60 ml)

Τα αντιπροσωπευτικά εύρη που παρουσιάζονται παρακάτω επιβεβαιώνονται για κάθε παρτίδα.

Φυσικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά		
Δείκτης	Μέθοδος	Εύρος
Ειδικό βάρος	Διαθλασίμετρο (ψηφιακό)	≤1,005-1,015
Ωσμωτικότητα	Ωσμοσίμετρο	75-275 mOsm/kg
pH	Μετρητής pH	5,0-7,0
Όψη	Οπτική	Διαυγής
Χρώμα	Οπτική	Κίτρινο
Μέσος αριθμός κυττάρων RBC	Μικροσκοπία	≤1 κύτταρα/hpf*
Μέσος αριθμός κυττάρων WBC	Μικροσκοπία	≤6 κύτταρα/hpf*

* Κύτταρα ανά πεδίο υψηλής ισχύος όπως μετράται με τη χρήση προσοφθάλμιου φακού 10X/αντικειμενικού φακού 40X

Τεστ κυήσεως		
Δείκτης	Μέθοδος	Εύρος
hCG	Εξέταση ούρων Quidel QuickVue hCG	Θετικό