

Scheda dei valori KOVA-Trol® III normale con hCG

Descrizione del prodotto: KOVA-Trol III normale con hCG

Numero di materiale: Kit 87331 (4 x 15 ml), 87327 (4 x 60 ml) e 87528 (8 x 60 ml)

Gli intervalli rappresentativi sono stati determinati statisticamente in base ai dati storici e verificati periodicamente con lotti rappresentativi testati con il metodo specificato.

Test su strisce per analisi delle urine Siemens							McKesson
Analita	Multistix Visual	Clinitek 50	Clinitek 100	Clinitek Status/Status +	Clinitek Advantus	Clinitek Novus	
pH	5,5-7,0	5,0-7,0	5,0-7,0	5,0-7,0	5,5-7,0	5,5-7,0	5,5-6,5
Proteine	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Glucosio	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Chetoni	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Bilirubina	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Sangue (emoglobina)	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Nitrito	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Urobilinogeno	0,2-1 EU/dl	0,2-1 EU/dl	0,2-1 EU/dl	0,2-1 EU/dl	0,2-1 EU/dl	0,2-1 EU/dl	0,2-1 EU/dl
Densità relativa	1,005-1,020	≤1,005-1,020	≤1,005-1,020	≤1,005-1,020	≤1,005-1,020	1,000-1,010	1,005-1,020
Esterasi leucocitaria	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Microalbumina	N.a.	10 mg/dl	10 mg/dl	10 mg/dl	N.a.	N.a.	N.a.
Creatinina	10-100 mg/dl	10-100 mg/dl	10-100 mg/dl	10-100 mg/dl	10-100 mg/dl	10-50 mg/dl	N.a.
A : C	N.a.	<30 normale			N.a.	Normale: Diluito - Normale	N.a.

Scheda dei valori KOVA-Trol® III normale con hCG

Descrizione del prodotto: KOVA-Trol III normale con hCG

Numero di materiale: Kit 87331 (4 x 15 ml), 87327 (4 x 60 ml) e 87528 (8 x 60 ml)

Gli intervalli rappresentativi sono stati determinati statisticamente in base ai dati storici e verificati periodicamente con lotti rappresentativi testati con il metodo specificato.

Test con strisce per analisi delle urine Roche							
Analita	Combur Visual	Chemstrip Visual	Chemstrip Criterion II	Urisys 1800	Urisys 1100	Cobas U411	Cobas U601
pH	5-7	5-7	5,5-7,0	5-7	5-7	5-7	5,5-7,0
Proteine	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Glucosio	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale
Chetoni	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Bilirubina	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Sangue (emoglobina)	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Nitrito	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Urobilinogeno	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale
Densità relativa	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,005-1,020	1,000-1,015
Esterasi leucocitaria	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo

Scheda dei valori KOVA-Trol® III normale con hCG

Descrizione del prodotto: KOVA-Trol III normale con hCG
 Numero di materiale: Kit 87331 (4 x 15 ml), 87327 (4 x 60 ml) e 87528 (8 x 60 ml)

Gli intervalli rappresentativi indicati di seguito sono confermati per ogni lotto.

Caratteristiche fisiche e microscopiche		
Marcatore	Metodo	Intervallo
Densità relativa	Rifrattometro (digitale)	≤1,005-1,015
Osmolalità	Osmometro	75-275 mOsm/kg
pH	Misuratore di pH	5,0-7,0
Aspetto	Visivo	Trasparente
Colore	Visivo	Giallo
Conta cellulare media dei globuli rossi	Microscopia	≤1 cellule/hpf*
Conta cellulare media dei globuli bianchi	Microscopia	≤6 cellule/hpf*

* Cellule per campo ad alta potenza, misurate con oculare 10X/obiettivo 40X

Test di gravidanza		
Marcatore	Metodo	Intervallo
hCG	Test urina hCG QuickVue Quidel	Positivo